



FR



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59

Téléphone : +49 (0)5431/9416-0

Téléfax : +49 (0)5431/9416-66

Site Internet : <http://www.rebotec.de>

E-mail : info@rebotec.de



N° de manuel d'utilisation :
03.07.148/2017-04

Manuel d'utilisation

Fauteuil roulant autopropulsé de douche et de toilettes

Fauteuil roulant de douche et de toilettes « Venedig » Article n° : 380.xx.yy / 100 kg Numéro de série



Similaire à l'illustration

xx = variante de couleur

yy = variante d'équipement



• Remarques importantes !


- **Avant la première utilisation, lire** le manuel d'utilisation et le conserver pour un usage ultérieur.
- Respecter toutes les remarques, en particulier les consignes de sécurité, et agir en conséquence.
- Joindre le manuel d'utilisation en cas de revente du produit.
- **Les manuels d'utilisation et de maintenance peuvent être téléchargés via notre page d'accueil.**

**Table des matières**

1. Remarques générales	3	9.12. Système anti-basculement	10
1.1. Description du produit.....	3	10. Résolution des problèmes	10
1.2. Introduction	3	11. Entretien.....	10
1.3. Symboles	3	12. Maintenance, réparation	10
1.4. Utilisation prévue	3	12.1. Maintenance	11
1.5. Utilisation, stockage	3	12.2. Réparation	11
1.6. Emballage	4		
1.7. Équipement.....	4		
2. Garantie.....	4		
3. Plaque signalétique & pièces de rechange.....	4		
3.1. Pièces de rechange & accessoire	4		
4. Réutilisation, durée de vie	5		
5. Mise au rebut	5		
6. Consignes de sécurité	5		
7. Informations produit	6		
7.1. Contenu de la livraison.....	6		
7.2. Données techniques	6		
7.3. Schéma.....	6		
8. Montage.....	7		
9. Fonctionnement du fauteuil	8		
9.1. S'asseoir	8		
9.2. Se lever.....	8		
9.3. Faire basculer les accoudoirs.....	8		
9.4. Régler la hauteur des repose-pieds	9		
9.5. Rabattre les repose-pieds	9		
9.6. Retirer les repose-pieds	9		
9.7. Retirer le siège de douche et de toilettes	9		
9.8. Retirer le coussin du dossier	9		
9.9. Manipuler le seau de toilette	9		
9.10. Utiliser le frein de blocage	9		
9.11. Régler le frein de blocage	9		

1. Remarques générales

1.1. Description du produit

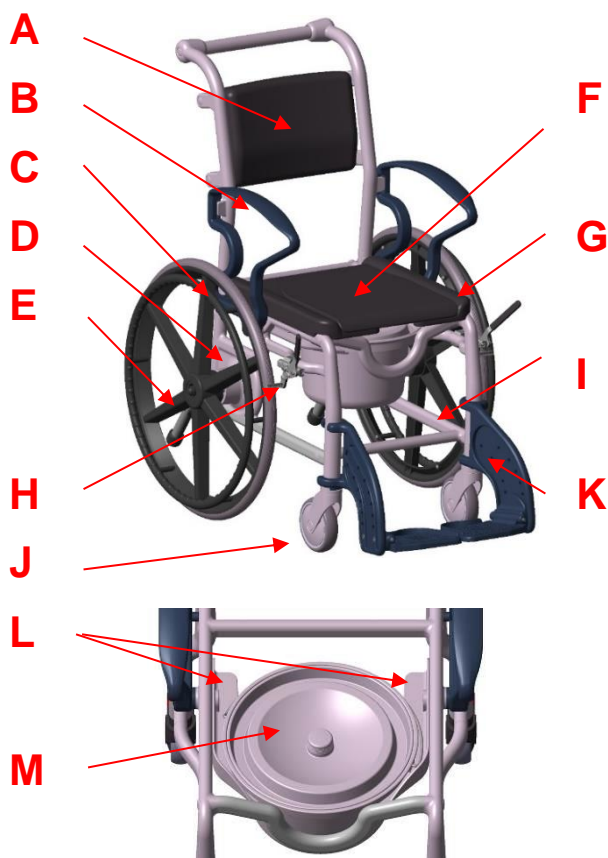

L'illustration du fauteuil montre :

A	Dossier
B	Accoudoir (rabattable)
C	Boulon d'arrêt
D	Cadre de fauteuil avec barres
E	Roue de 24" avec main courante pour fauteuil autopropulsé
F	Coussin du siège en polyuréthane (amovible)
G	Siège en polyuréthane avec ouverture pour soins
H	Frein de blocage pour main courante
I	Plaque signalétique du produit
J	Roue de 5" sans frein
K	Repose-pied (réglable)
L	Support de seau à gauche/droite
M	Seau de toilette avec couvercle

1.2. Introduction

- Ce manuel d'utilisation contient des informations et des remarques concernant la mise en service, l'utilisation, le fonctionnement, la maintenance et

l'entretien du fauteuil roulant autopropulsé de douche et de toilettes.

- Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respecter en particulier les consignes de sécurité et agir en conséquence.

1.3. Symboles

	Lire le manuel !		Année de construction du produit
	Produit conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux		
	Prudence : respecter les consignes de sécurité !		
	Attention : remarque !		Information importante !
	Instructions d'entretien		Instructions de maintenance

1.4. Utilisation prévue

- Le fauteuil roulant de douche et de toilettes s'utilise à domicile et dans le cadre d'une hospitalisation. Le fauteuil est exclusivement conçu comme dispositif d'aide pour la douche ou le bain, aller aux toilettes ou transférer une personne à l'intérieur.
- La douche doit pouvoir permettre le passage d'un fauteuil. Le fauteuil n'est pas adapté à une position assise prolongée.
- Les personnes ayant une capacité de perception limitée, présentant des lésions articulaires au niveau des bras et ne pouvant s'asseoir ne doivent pas utiliser le fauteuil autopropulsé.

• **Poids max. de l'utilisateur du fauteuil : 100 kg**

1.5. Utilisation, stockage

Attention : risque d'endommagement !

- La température d'utilisation du produit doit se trouver entre +5 °C et +40 °C. Stocker le produit dans un endroit sec présentant une température entre 0 et +40 °C et une humidité de 30 à 55 %. Dans d'autres conditions, le produit ne peut être utilisé qu'à court terme.
- Éviter une exposition directe du produit aux rayons du soleil.

- Le fauteuil ne doit pas être utilisé dans une piscine ni dans un sauna, car cela peut entraîner une décoloration des surfaces et réduire la résistance mécanique.
- Le fauteuil roulant de douche peut être utilisé dans les endroits où l'utilisation ou bien l'accès à une baignoire ou à une douche standard n'est plus possible en raison d'un handicap.
- Le fauteuil roulant de toilettes peut être utilisé dans les endroits où l'utilisation ou bien l'accès à des toilettes standards n'est plus possible en raison d'un handicap. L'assise comprend une ouverture similaire à des toilettes, sous laquelle un seau de toilette avec couvercle peut être inséré.
- En raison de la conception et de l'utilisation prévue du produit, un démontage pour le transport ou le stockage n'est ni prévu ni nécessaire.

1.6. Emballage

- Nous recommandons de conserver l'emballage extérieur pour un transport ultérieur afin que le produit puisse être envoyé en toute sécurité en cas de retour.



1.7. Équipement


- Le fauteuil est composé d'un cadre en plastique avec insert de tube, de deux roues pivotantes avec frein de blocage à l'avant et de deux roues de 24" avec main courante à l'arrière.
- Les accoudoirs sont rabattables. Les repose-pieds sont réglables en hauteur, peuvent être retirés et rabattus.
- Seau de toilette avec couvercle

2. Garantie

- Nous accordons une garantie fabricant de 2 ans pour le produit. Nos conditions générales de vente et l'utilisation conforme du produit font office de conditions préalables. Toute modification réalisée soi-même sur le produit et sans l'accord du fabricant entraîne l'annulation de la garantie.

3. Plaque signalétique & pièces de rechange

- Les informations suivantes sont disponibles sur la plaque signalétique :

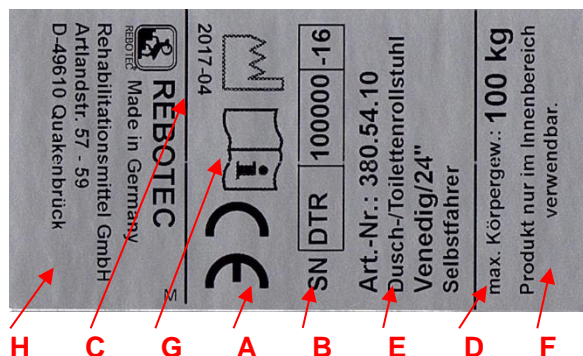

A	Marque de conformité
B	Numéro de série du produit
C	Année de construction du produit (année-mois)
D	Charge admissible (poids corporel max.)
E	Désignation du produit
F	Remarque (utilisation)
G	Lire le manuel d'utilisation
H	Données du fabricant (adresse)

- La plaque signalétique est importante pour l'identification du produit et ne doit pas être retirée.

i Les données telles le nom, le numéro de série (NS) et l'année de construction du produit sont requises pour éviter toute commande erronée de pièces de rechange et pour traiter une réclamation.

3.1. Pièces de rechange & accessoire

Article n°	Désignation
301.00	Seau de toilette avec couvercle
457.10.22	Siège en polyuréthane / ouverture pour soins
409.00.20	Support de seau à gauche/droite
457.10.24	Coussin du siège en polyuréthane
457.10.20	Coussin du dossier en polyuréthane
440.40.89	Frein de blocage gauche
440.40.90	Frein de blocage droit
03.07.148	Manuel d'utilisation
01.11.150	Manuel de maintenance des fauteuils
Accessoire	
322.30.10	Ceinture de sécurité, rouge, taille S

L'illustration montre : une ceinture de sécurité



4. Réutilisation, durée de vie

- Le produit peut être réutilisé. Le nombre de réutilisations dépend de la fréquence d'utilisation et de l'usage du produit.
- Avant chaque réutilisation, le produit doit subir un traitement hygiénique, sa sécurité technique et de fonctionnement doit être vérifiée, et, le cas échéant, de nouveau garantie.
- Si le produit est utilisé comme prévu et conformément aux consignes de sécurité, la durée de vie est de 5 ans.
- La durée de vie effective peut toutefois varier en fonction de la fréquence et de l'intensité d'utilisation ainsi que de l'état général.

5. Mise au rebut

- La mise au rebut et le recyclage des produits ainsi que des emballages usagés doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Se renseigner auprès d'une entreprise de traitement des déchets.

6. Consignes de sécurité



Respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation des fauteuils :

Prudence : risque de glissement !

- Avant l'utilisation, contrôler si l'assise est correctement bloquée dans le cadre du siège.
- Toujours bloquer les freins de blocage des (deux) roues de 24" avant d'utiliser le fauteuil (sauf en mouvement) afin de l'empêcher de rouler.
- Ne pas s'asseoir sur le devant sur le bord ou le coussin du siège, mais sur toute l'assise.

Prudence : risque de basculement !

- Le fauteuil doit uniquement être poussé au niveau de la poignée de poussée (dossier).
- Avant de s'asseoir / se lever, les repose-pieds doivent être baissés ou relevés. Ne pas se placer sur les repose-pieds.
- Ne pas buter avec le fauteuil dans les seuils de porte, les arêtes ou autres irrégularités.
- Utiliser uniquement le fauteuil à l'intérieur, sur une surface plane et antidérapante.

- Avancer uniquement à une allure modérée, au pas, avec le fauteuil (avec ou sans patient).
- Ne pas se pencher du fauteuil (à l'arrêt et en mouvement). Une mauvaise position des roues pivotantes (orientées vers l'intérieur) réduit la stabilité.

Prudence : risque de rupture !

- Le fauteuil convient uniquement au transport de personnes. Respecter le poids corporel maximal autorisé (donnée figurant sur la plaque signalétique) !
- Ne **jamais** porter ou soulever le fauteuil lorsqu'un patient est installé.
- Ne pas se tenir ou tirer les équipements supplémentaires (par ex. support de perfusion, rembourrage des accoudoirs).

Prudence : risque de pincement !

- Ne pas saisir le guidage articulaire en relevant ou en baissant les accoudoirs afin d'éviter tout pincement d'une partie du corps ou d'autres parties. **Voir également le point 9.3.**
- En fixant le plateau du siège, ne pas saisir de surface entre l'assise et le cadre du siège afin d'éviter tout pincement d'une partie du corps.
- En rabattant les repose-pieds, veiller à éviter tout pincement de parties.
- Un risque de pincement des tissus mous existe en retirant et en insérant le seau de toilette. Pour éviter toute blessure, le seau doit uniquement être retiré ou inséré lorsqu'aucun patient n'est installé dans le fauteuil.

Prudence . risque de chute !

- Le fauteuil doit uniquement être utilisé avec des accoudoirs verrouillés en mouvement ou lorsque le patient s'assoit.
- Le patient peut uniquement s'asseoir, se lever et s'installer sous surveillance, et, suivant son état de santé, avec l'aide d'un soignant formé.
- Les patients ayant tendance à présenter des manipulations ou mouvements incontrôlés ne doivent pas utiliser le fauteuil sans surveillance.
- La conduite dans une pente ou une côte doit uniquement avoir lieu avec l'aide d'un soignant. Si possible, conduire en arrière dans les côtes et en avant dans les pentes.

Prudence : risque de blessure liée à la température !

- En cas de températures de surface supérieures à 40 °C, il existe un risque de blessure. Ne pas soumettre le fauteuil à un fort échauffement (lumière du soleil, positionnement à proximité de sources de chaleur (par ex. chauffage), nettoyage à l'eau chaude). Avant une réutilisation du fauteuil, laisser les surfaces refroidir.

i Lors de l'utilisation du fauteuil par des patients présentant une insensibilité cutanée (ne pouvant percevoir une augmentation de la température et/ou souffrant de lésions cutanées), le personnel soignant doit en contrôler la chaleur (par ex. en touchant avec le dos de la main).

Voir paragraphe : 1.5

7. Informations produit

7.1. Contenu de la livraison

- L'absence de défauts sur le produit et l'intégralité du contenu de la livraison ont été vérifiés à l'usine. À la réception, vérifier la présence d'éventuels dommages causés par le transport ainsi que l'intégralité du contenu de la livraison.
- 1 fauteuil roulant autopropulsé de douche et de toilettes
- 1 dossier
- 2 roues de 24" avec main courante
- 1 siège (suivant la variante d'équipement)
- 1 seau de toilette avec couvercle
- 1 carton d'accessoire
- 1 manuel d'utilisation

7.2. Données techniques

- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dues à des améliorations techniques par rapport au modèle représenté dans le présent manuel d'utilisation.

Dimensions		Venedig
A.	Hauteur	1 030 mm
B.	Largeur	670 mm
C.	Profondeur	970 mm
D.	Hauteur du siège	540 mm
E.	Largeur du siège	400 mm
	Largeur entre les accoudoirs	420 mm



Dimensions		Venedig
F.	Profondeur du siège	450 mm
G1.	Hauteur de passage	430 mm
G2.	Largeur de passage	330 mm
H.	Hauteur des pieds	320 - 460 mm
I.	Hauteur des accoudoirs	775 mm
J1	Roue 2 x 5" Ø	125 mm
J2.	Roue 2 x 24" Ø	610 mm
	Rayon de braquage	1 050 mm
	Poids corporel	100 kg max.
	Poids du produit*	23,7 kg
Tolérance cutanée		DIN EN 10993-1/-5
Allumabilité		DIN EN 1021-1/-2**

*Donnée : poids du produit sans accessoire

**Ignifuge : article en polyuréthane

Tolérances de fabrication des dimensions : +/- 5 mm

7.3. Schéma

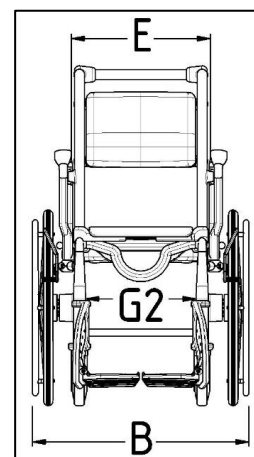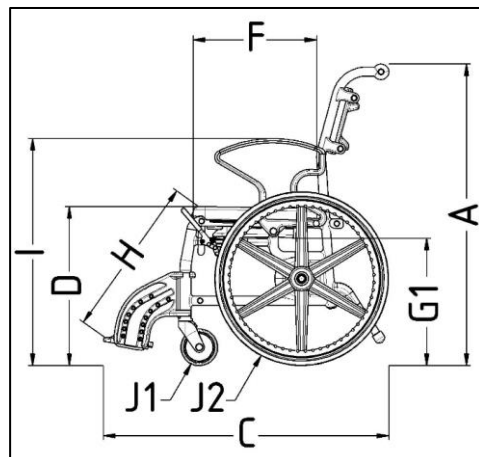


8. Montage


- Le produit est livré prémonté dans un carton. Les procédures de montage suivantes sont à effectuer avant la mise en service :

1. Monter le dossier (voir également 9.3)

- Placer le cadre de base sur une surface plate et faire basculer les deux accoudoirs (1) vers l'arrière jusqu'à la butée.
- Insérer maintenant le dossier (2) dans les deux tubes du corps du fauteuil et les faire glisser jusqu'à la butée sur le cadre.

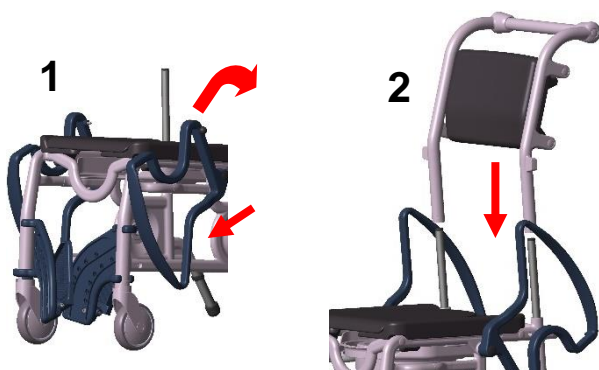

- Faire de nouveau basculer les deux accoudoirs (3) vers l'avant jusqu'à ce que les rabats (A) du dossier s'enclenchent dans l'encoche au niveau de l'accoudoir, de même pour les boulons d'arrêt (B) dans le cadre.

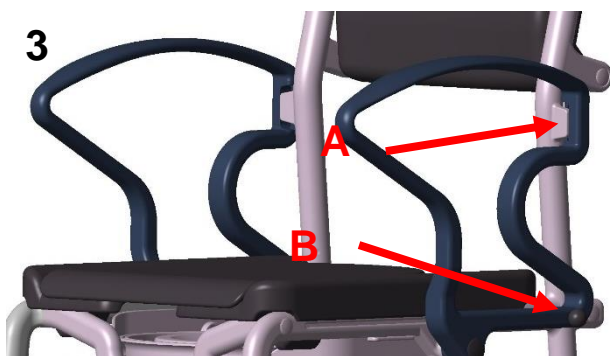


2. Monter la roue de 24"

- Insérer la rondelle sur la vis.
- Insérer la vis depuis l'extérieur (1) à travers la roue de 24".
- Insérer la rondelle sur la vis.
- Tenir la roue de 24" devant la douille d'adaptation et insérer la vis à travers les deux pièces.
- Insérer la rondelle.
- Visser l'écrou de sécurité.

- Serrer l'écrou (avec 2 clés polygonaux de 19 mm).


- Serrer fermement sans empêcher la roue de 24" de tourner !

- Fixer le capuchon gris et noir.

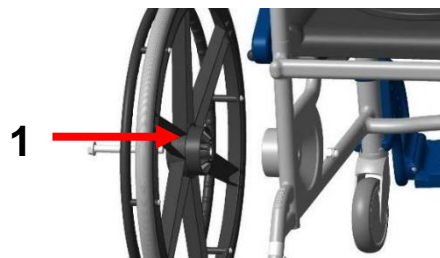


3. Régler les repose-pieds

- Faire pivoter les bras pivotants des repose-pieds vers l'avant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent seuls, puis abaisser les repose-pieds.

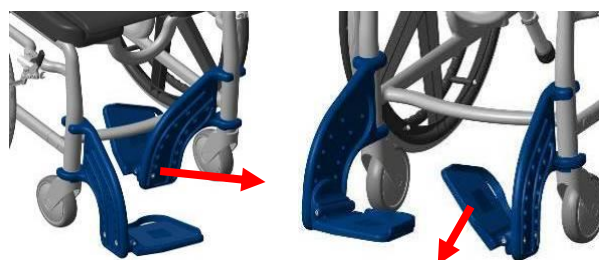

4. Monter les freins de blocage

- Desserrer les deux vis du support de frein (1) jusqu'à pouvoir les faire glisser sur l'épaule au niveau du cadre. Faire ensuite glisser le support de frein jusqu'à la butée (2) et serrer légèrement les deux vis. Faire glisser le levier de frein (3) à travers l'ouverture du support de frein et l'aligner.

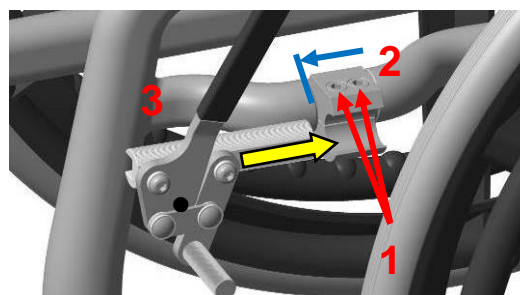

Respecter le montage à gauche/droite !

- Réglage du frein de blocage de la roue de 24" (voir : 9.11)

Réglage de la hauteur des repose-pieds (voir : 9.4)

9. Fonctionnement du fauteuil

• Les manipulations suivantes sont à respecter lors du fonctionnement du fauteuil :

• Avant l'utilisation, s'assurer que le fauteuil se trouve dans un état convenable. Si nécessaire, suivant son handicap (mobilité et force musculaire appropriées), le patient ne doit pas s'asseoir ni se lever sans un soignant. Le fauteuil ne doit pas être utilisé pour le transport prolongé du patient.

9.1. S'asseoir

• Avant de s'asseoir, veiller à la bonne stabilité du fauteuil pour éviter tout glissement (**voir : 9.10**) et basculement, à ce que **les deux roues de 24" soient bloquées**, que les accoudoirs soient correctement enclenchés, que le siège de douche et de toilettes soit fermement fixé, et à ce que les repose-pieds soient rabattus latéralement ou relevés.



• Le patient doit se placer le plus près possible du fauteuil. Le patient doit s'asseoir lentement sur le coussin en s'appuyant sur les deux accoudoirs.

• Si son handicap empêche cette opération, il doit être aidé

par un soignant.

• Si nécessaire, utiliser une sangle de relevage ou un lève-personne.

Prudence . risque de chute !



• Il faut éviter tout glissement sur le siège du fauteuil. Le patient doit si possible être assis sur toute l'assise, pas seulement sur le bord. Pendant le transport, le patient doit s'appuyer contre le dossier et utiliser les repose-pieds.

9.2. Se lever

• Avant de se lever, veiller à la bonne stabilité du fauteuil pour éviter tout glissement (**voir : 9.10**) et basculement, à ce que **les deux roues de 24" soient bloquées**, que les accoudoirs soient correctement enclenchés et à ce que les repose-pieds soient rabattus latéralement ou relevés.

• Le patient doit bouger vers l'avant de l'assise, jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol.



• Il peut désormais appuyer ses bras sur les accoudoirs et se lever lentement de son siège. Ne pas trop pencher le corps vers l'avant afin d'éviter toute chute. Le patient doit laisser le personnel soignant l'aider à se lever.

Prudence . risque de chute !



• Le patient ne doit jamais s'appuyer sur les repose-pieds pour s'asseoir ou se lever (quitter le fauteuil).


9.3. Faire basculer les accoudoirs

• En retirant les boulons d'arrêt (A), le système de blocage est déverrouillé et les accoudoirs peuvent basculer vers l'arrière. En relevant l'accoudoir, vérifier le logement correct du système de blocage au niveau du dossier (B) et du boulon d'arrêt (A).

Prudence : risque de pincement !

• Le basculement des accoudoirs s'effectue grâce à une opération à deux mains. Pendant toute l'opération de basculement, maintenir les boulons d'arrêt (A) et amener l'accoudoir en position (C) avec l'autre main.


• Toucher uniquement la partie extérieure, ne pas saisir de surface à l'intérieur de l'accoudoir ni passer à travers.

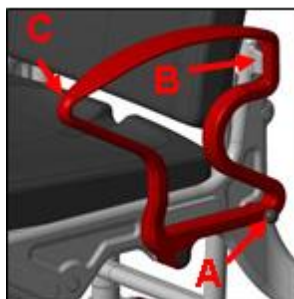

 **Contrôler régulièrement le verrouillage, car le fonctionnement peut être limité par d'éventuels dépôts.**

9.4. Régler la hauteur des repose-pieds

- Le repose-pied est réglable en hauteur sur 7 niveaux (10-24 mm). Dévisser les vis latérales au niveau du repose-pied à l'aide d'une clé Allen (de 5). Sélectionner le niveau adéquat et revisser le repose-pied.
- Veiller à bien serrer les vis.

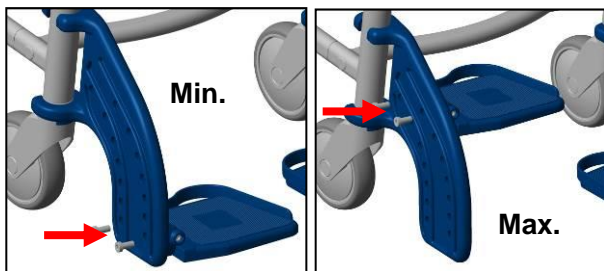

9.5. Rabattre les repose-pieds

- Faire d'abord pivoter les repose-pieds vers le haut et les relever ensuite légèrement. Ils peuvent désormais être rabattus latéralement vers l'arrière.

9.6. Retirer les repose-pieds

- Relever les repose-pieds d'env. 100 mm et les faire pivoter à 90° vers l'extérieur. Ils peuvent désormais être complètement glissés vers le haut et retirés.

9.7. Retirer le siège de douche et de toilettes

- En le soulevant, le siège peut être retiré de sa trame au niveau du cadre du fauteuil pour être nettoyé ou remplacé.

9.8. Retirer le coussin du dossier



- En exerçant une pression avec la main à l'arrière, le coussin du dossier peut être retiré de sa trame au niveau du dossier du fauteuil pour être nettoyé ou remplacé.


 **Ne pas utiliser le fauteuil sans le coussin du dossier !**

9.9. Manipuler le seau de toilette


- Glisser le seau de toilette sous le fauteuil depuis l'arrière du siège. Pour l'enlever, soulever légèrement le seau et le retirer ensuite par l'arrière.

9.10. Utiliser le frein de blocage

- Le frein de blocage au niveau de la roue de 24" est desserré en tirant (1) le levier vers l'arrière.

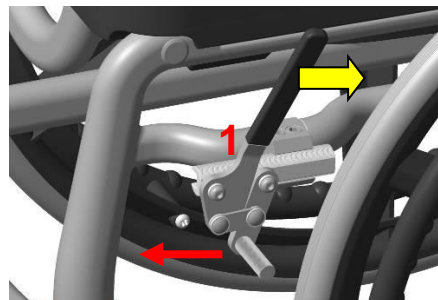


- En poussant (2) le levier vers l'avant, la roue de 24" est freinée. Pousser complètement le levier !

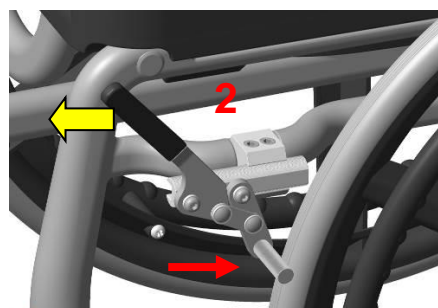

- Si le freinage n'est pas suffisant ou diminue au fur et à mesure de l'utilisation, il est nécessaire d'effectuer un nouveau réglage du frein de blocage (voir : 9.11).

9.11. Régler le frein de blocage

- Pousser complètement le levier de frein (1) vers l'arrière.
- Desserrer seulement légèrement les vis à six pans (2) du frein de blocage avec une clé (de 5). Faire glisser le frein de blocage jusqu'à **env. 25 mm** devant le profil de roue de 24" et serrer fermement les vis à six pans.

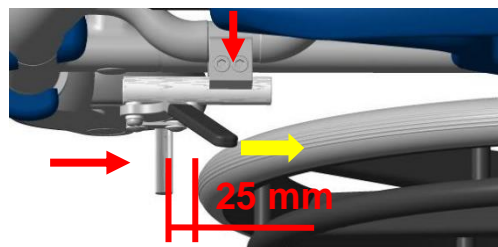

- Vérifier le fonctionnement du frein de blocage en poussant le levier vers l'avant. Si le freinage n'est toujours pas suffisant, procéder encore une fois à un nouveau réglage (diminuer ou augmenter l'écart).

Le réglage et nouveau réglage individuels du frein de blocage doivent uniquement être effectués par un revendeur. Cela vaut également pour toute modification en cas de remplacement ou réparation d'un frein de blocage.

9.12. Système anti-basculement

- Pour franchir les obstacles, le fauteuil autopropulsé peut être basculé vers l'arrière. Les roues avant sont soulevées et un obstacle peut ainsi être franchi.
- Tenir fermement le dossier avec les deux mains et basculer le fauteuil vers l'arrière jusqu'à ce que les deux pieds touchent presque le sol.
- En retirant le clip, le pied anti-basculement peut être enlevé pour être remplacé.

Prudence : risque de basculement !

Ne jamais utiliser le fauteuil sans pied anti-basculement.



10. Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
L'accoudeoir ne bascule pas	Dépôt au niveau du système de blocage (boulon d'arrêt)	Nettoyage, contrôle régulier
Le boulon d'arrêt ne peut pas être retiré	Dépôts, ressort de tension coincé ou défectueux	Nettoyage, remplacement du boulon d'arrêt
Le repose-pied ne peut pas être rabattu	Dépôt au niveau de l'articulation, tension	Nettoyage, vérification du vissage

Problème	Cause possible	Solution
Le frein de blocage ne freine pas	Défaut général	Voir Entretien !
La roue pivote difficilement	Dépôts	Nettoyage
La roue ne pivote pas	Défaut général	Voir Entretien !
La surface de la roue n'est pas régulière	Usure du profil très inégale	Voir Entretien !
Le cadre du fauteuil est instable	Serrage insuffisant	Serrer le vissage
Le support de roue est tordu	Collision avec un obstacle	Voir Entretien !

11. Entretien



- Pour l'entretien, utiliser un produit nettoyant et désinfectant doux standard. Après le nettoyage, rincer à l'eau claire et sécher le fauteuil avec un chiffon.
- N'utiliser aucun produit abrasif ni aucun produit nettoyant (respecter les remarques produit !) contenant des solvants agressifs (acides, essence, diluants) ou objet de nettoyage dur (brosses), car cela endommagerait la surface en plastique ou pourrait favoriser la formation de dépôts au niveau des pièces en plastique et d'autres matériaux.

12. Maintenance, réparation

Peuvent éventuellement être à l'origine d'accidents :

- une usure non constatée à temps,
- une manipulation ou utilisation non conforme, ou
- une maintenance irrégulière voire l'absence de maintenance.
- Nous rappelons que la maintenance du fauteuil doit être effectuée de manière professionnelle **une fois par an minimum** pour des raisons de sécurité et pour éviter tout accident. (Référence à la loi allemande relative aux dispositifs médicaux (MPG) et à l'ordonnance allemande relative aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV))

12.1. Maintenance

- Des contrôles techniques de sécurité réguliers sont nécessaires :
- Vérifier l'absence de dommages visibles sur les produits (fissures, ruptures, pièces desserrées).
- Vérifier le serrage suffisant de tous les raccords vissés (en particulier ceux des supports de roue et du cadre).
- Vérifier le fonctionnement des accoudoirs et des boulons d'arrêt.
- Vérifier le fonctionnement du repose-pied (remplacer les repose-pieds défectueux).
- Vérifier la qualité de roulement et le profil des roues (remplacer les roues défectueuses).
- Vérifier le fonctionnement des freins de blocage (remplacer les freins défectueux).
- Inspecter l'accessoire à la recherche de défauts.

12.2. Réparation

- En cas de questions concernant la maintenance du fauteuil, s'adresser à un revendeur ou à un fournisseur de matériel médical.
- En cas de dommages et/ou de réparations nécessaires, contacter immédiatement le revendeur.
- N'effectuer **aucune** modification ou transformation sur le fauteuil soi-même. Cela compromet la sécurité et le fonctionnement du fauteuil. **REBOTEC n'assume aucune responsabilité concernant le produit à ce propos.**
- En cas de réparation, seules les pièces de rechange d'origine du fabricant REBOTEC doivent être utilisées. Respecter les remarques concernant la garantie commerciale et la garantie légale.
- Après une maintenance ou une réparation, effectuer un nettoyage avant toute utilisation pour des raisons d'hygiène.
- Respecter les remarques concernant la commande de pièces de rechange, la réutilisation et la durée de vie du fauteuil.

i REBOTEC propose un protocole de maintenance pour documenter la maintenance et la réparation. Le manuel d'utilisation et le protocole de maintenance peuvent être commandés ou consultés sur notre site internet

www.rebotec.de

Cela permet également d'imprimer les informations et de les lire si nécessaire.

